

# Übersicht Einbring- und Drehmomente

**max. 20 Ncm mit  
Insertionsabutment  
max. 50 Ncm**



FairTwo™

**max. 5 Ncm**



FairTwo™  
Abdeckschraube

**max. 70 Ncm**



FairOne™

**max. 70 Ncm**



FairWhite™

**max. 30 Ncm**



sämtliche Bohrer

**max. 5 Ncm**




Richtungsindikator FT

**max. 10 Ncm**



Scanbody

**definitiv 10 Ncm**

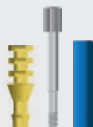

Abformung offen

**definitiv 10 Ncm**



Abformung geschlossen

**max. 10 Ncm**



Einheilkappen

**max. 10 Ncm**



DIM-Analog

**max. 20 Ncm**



Bohrerverlängerung

**definitiv 25 Ncm  
Labor def. 10 Ncm**



Abutmentschrauben

**Insertion max. 20 Ncm  
definitiv 25 Ncm**



Insertionsabutment

**Cave: 0 Ncm!**



Kontor  
Insertionsabutment

**definitiv 25 Ncm  
Labor def. 10 Ncm**



Metallbasis

**definitiv 25 Ncm  
Labor def. 10 Ncm**



Standard

**definitiv 25 Ncm  
Labor def. 10 Ncm**



Gewinkelt

**definitiv 25 Ncm  
Labor def. 10 Ncm**



LOCATOR®  
Classic + R-Tx

**definitiv 25 Ncm  
Labor def. 10 Ncm**



Konus-Magnet

**definitiv 25 Ncm  
Labor def. 10 Ncm**



One-Piece

**definitiv 25 Ncm  
Labor def. 10 Ncm**



CAM-Preform

**max. 25 Ncm**



Schraubendreher



# Übersicht Drehzahlen

max. 800 U/min.



Dreikantbohrer

max. 800 U/min.



Pilotbohrer

max. 800 U/min.



Formbohrer

max. 800 U/min.



Erweiterungsbohrer

max. 800 U/min.



Mehrlängenbohrer

max. 800 U/min.



Mehrlängenbohrer

max. 25 U/min.



Gewindeschneider

max. 800 U/min



Schleimhautstanze

max. 6000 U/min.



Bohrerverlängerung

max. 25 U/min.



Einschraub. frikativ

max. 25 U/min.



Einschraubschlüssel

max. 25 U/min.



Einschraubschlüssel FT

Cave: 0 U/min.



Kontur  
Insertionsabtmet

max. 1000 U/min.



Biokeramik Rosenbohrer

max. 500 U/min.



Biokeramik Pilotbohrer

max. 500 U/min.



Biokeramikformbohrer

max. 500 U/min.



Biokeramik-  
erweiterungsbohrer

