


# FairOne Implantat 2,8 x 13 mm

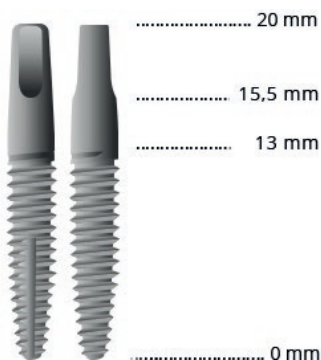

## Artikelnummer 10 28 13

- Einteiliges dentales Implantat mit ausgezeichneter Primärstabilität, resorbierbare Kalziumphosphatbeschichtung zur nachweislich beschleunigten Osseointegration,
- spezielle Zone zur Weichgewebsintegration und prothetischem Kopf

## Eignung / Freigabe

- Schmale Einzelzahnücke mit geringer Belastung (Zähne 12, 22, 31, 32, 41 und 42)
- CAVE! Das durchmesserreduzierte Spezialimplantat kann bei Verwendung in anderen Regionen aufgrund hoher mechanischer Belastungen brechen.

## Werkstoff und Eigenschaften

- Titan medical grade 5,
- Oberfläche gestrahlt (AlO)
- Beschichtung: BONIT®, 2 phasiges Kalziumphosphat,
- Schichtdicke ca. 20 µm, blättert nicht ab, resorbierbar

## Verpackung (Verpackungseinheit 1)

- Sterile Primärverpackung: medizinisches Kunststoffröhrchen mit Titanschutzhülle und Deckel
- Sterile Sekundärverpackung: medizinischer Blister mit Sterilisationsindikator für Gammastrahlen (roter Punkt zeigt: ist bestrahlt worden; gelber Punkt zeigt: keine Bestrahlung)
- Karton: enthält zusätzlich Aufkleber für Patientenakte

## Aufbereitung

- Das Implantat ist steril verpackt.
- Eine Resterilisation ist nicht möglich

## Verbundene Teile, Zubehör

- **Insertion:**
  - Einschraubschlüssel FairOne Ø 2,8 (Artikel 90 28 02)
- **Implantatbettaufrbereitung:**
  1. Vorbohrer (Artikel 20 20 19) , Pilotbohrer (20 15 16, 20 20 16), oder Pilotbohrer für Schablonen (20 20 20)
  2. Formbohrer Ø 2,8 Länge 13 mm (Artikel 21 28 13)
- **Zubehör:**
  - Laboranalog Ø 2,8 (Artikel 80 28 01)
  - Führungsstift und Stanze Ø 2,8 (Artikel 30 28 01 und 30 28 02)
  - Röntgenschablone 100% und 130% (Artikel 99 01 00 und 99 01 30)
  - Implantatpässe (Artikel 99 00 00)

## Weiterführende Informationen

- Chirurgiehandbuch
- Prothetikhandbuch
- Bonitdatenblatt