


FairOne Implantat 3,5 x 16 mm

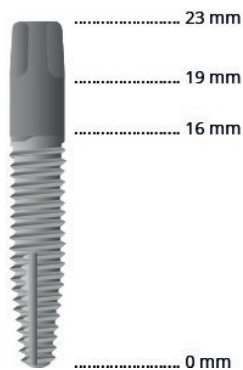

Artikelnummer 10 35 16

- Einteiliges dentales Implantat mit ausgezeichneter Primärstabilität, resorbierbare Kalziumphosphatbeschichtung zur nachweislich beschleunigten Osseointegration,
- spezielle Zone zur Weichgewebsintegration und prothetischem Kopf

Eignung / Freigabe

- Einzelzahnersatz,
- mehrgliedrige Brücken,
- zahnloser Kiefer

Werkstoff und Eigenschaften

- Reintitan medical grade 4,
- Oberfläche gestrahlt (AIO)
- Beschichtung: BONIT®, 2 phasiges Kalziumphosphat,
- Schichtdicke ca. 20 µm, blättert nicht ab, resorbierbar

Verpackung (Verpackungseinheit 1)

- Sterile Primärverpackung: medizinisches Kunststoffröhrchen mit Titanschutzhülle und Deckel
- Sterile Sekundärverpackung: medizinischer Blister mit Sterilisationsindikator für Gammastrahlen (roter Punkt zeigt: ist bestrahlt worden; gelber Punkt zeigt: keine Bestrahlung)
- Karton: enthält zusätzlich Aufkleber für Patientenakte

Aufbereitung

- Das Implantat ist steril verpackt.
- Eine Resterilisation ist nicht möglich

Verbundene Teile, Zubehör

- **Insertion:**
 - Einschraubschlüssel FairOne friktiv Ø 3,5 (Artikel 90 35 01) oder
 - Einschraubschlüssel FairOne Ø 3,5 (Artikel 90 35 02)
- **Implantatbetaufbereitung:**
 1. Vorbohrer (Artikel 20 20 19), Pilotbohrer (20 15 16, 20 20 16), oder Pilotbohrer für Schablonen (20 20 20)
 2. Formbohrer Ø 3,5 Länge 16 mm (Artikel 21 35 16)
optional bei hartem Knochen:
 - 2b) Erweiterungsbohrer Ø 3,5 Länge 16 mm (Artikel 22 35 16)
 - 2c) und/oder Gewindeschneider Ø 3,5 (Artikel 23 35 00)
- **Zubehör:**
 - Laboranalog Ø 3,5 (Artikel 80 35 01)
 - Bohrhülse Ø 3,5 (Artikel 23 35 00)
 - Führungsstift und Stanze Ø 3,5 (Artikel 30 35 01 und 30 35 02)
 - Richtungsindikator Ø 3,5 (Artikel 90 35 03)
 - Osteotom gerade/gewinkelt Ø 3,5 (Artikel 30 35 11 und 30 35 12)
 - Röntgenschablone 100% und 130% (Artikel 99 01 00 und 99 01 30)
 - Implantatpässe (Artikel 99 00 00)

Weiterführende Informationen

- Chirurgiehandbuch
- Prothetikhandbuch

- Bonitdatenblatt