


FairOne Implantat 5,0 x 08 mm

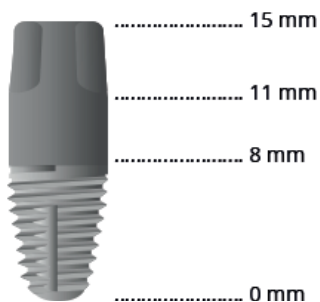

Artikelnummer 10 50 08

- Einteiliges dentales Implantat mit ausgezeichneter Primärstabilität, resorbierbare Kalziumphosphatbeschichtung zur nachweislich beschleunigten Osseointegration,
- spezielle Zone zur Weichgewebsintegration und prothetischem Kopf

Eignung / Freigabe

- Einzelzahnersatz,
- mehrgliedrige Brücken,
- zahnloser Kiefer

Werkstoff und Eigenschaften

- Reintitan medical grade 4,
- Oberfläche gestrahlt (AIO)
- Beschichtung: BONIT®, 2 phasiges Kalziumphosphat,
- Schichtdicke ca. 20 µm, blättert nicht ab, resorbierbar

Verpackung (Verpackungseinheit 1)

- Sterile Primärverpackung: medizinisches Kunststoffröhrchen mit Titanschutzhülle und Deckel
- Sterile Sekundärverpackung: medizinischer Blister mit Sterilisationsindikator für Gammastrahlen (roter Punkt zeigt: ist bestrahlt worden; gelber Punkt zeigt: keine Bestrahlung)
- Karton: enthält zusätzlich Aufkleber für Patientenakte

Aufbereitung

- Das Implantat ist steril verpackt.
- Eine Resterilisation ist nicht möglich

Verbundene Teile, Zubehör

- **Insertion:**
 - Einschraubschlüssel FairOne friktiv Ø 5,0 (Artikel 90 50 01) oder
 - Einschraubschlüssel FairOne Ø 5,0 (Artikel 90 50 02)
- **Implantatbettauflbereitung:**
 1. Vorbohrer (Artikel 20 20 19) , Pilotbohrer (20 15 16, 20 20 16), oder Pilotbohrer für Schablonen (20 20 20)
 2. Formbohrer Ø 3,5 Länge 08 mm (Artikel 21 35 08)
 3. Formbohrer Ø 4,2 Länge 08 mm (Artikel 21 42 08)
 4. Formbohrer Ø 5,0 Länge 08 mm (Artikel 21 50 08)optional bei hartem Knochen:
 - 4b) Erweiterungsbohrer Ø 5,0 Länge 08 mm (Artikel 22 50 08)
 - 4c) und/oder Gewindeschneider Ø 5,0 (Artikel 23 50 00)
- **Zubehör:**
 - Laboranalog Ø 5,0 (Artikel 80 50 01)
 - Bohrhülse Ø 5,0 (Artikel 23 50 00)
 - Führungsstift und Stanze Ø 5,0 (Artikel 30 50 01 und 30 50 02)
 - Richtungsindikator Ø 5,0 (Artikel 90 50 03)
 - Osteotom gerade/gewinkelt Ø 5,0 (Artikel 30 50 11 und 30 50 12)
 - Röntgenschablone 100% und 130% (Artikel 99 01 00 und 99 01 30)
 - Implantatpässe (Artikel 99 00 00)

Weiterführende Informationen

- Chirurgiehandbuch
- Prothetikhandbuch
- Bonitdatenblatt