


# Formbohrer 3,5 x 10 mm

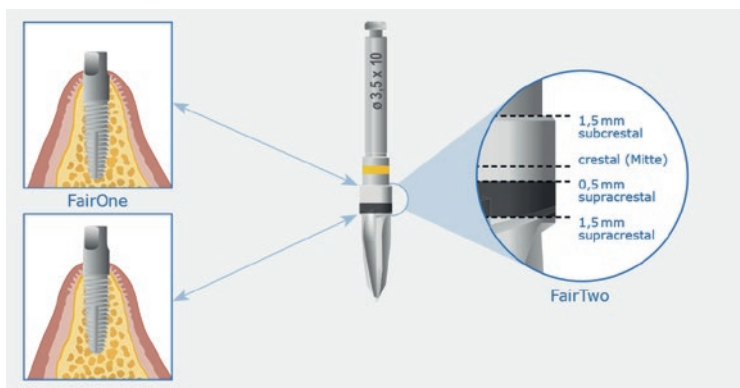

## Artikelnummer 21 35 10

- Vibrationsarmer und selbstzentrierender Bohrer für die formkongruente Implantatbettaufrbereitung FairOne und FairTwo mit Durchmesser 3,5 mm und Nennlänge 10 mm;
- Kennung ein Farbring gelb
- extrem lange Schnittlänge und Schnittfestigkeit,
- generiert Knochenspäne

## Eignung /Freigabe

- Max. 800 Umdrehungen pro Minute, wenig Druck
- Grünes Winkelstück mit Untersetzung 10:1
- Kühlung erforderlich
- Bohrer ist im Gebrauch regelmäßig von Knochenspänen zu reinigen

## Werkstoff und Eigenschaften

- Medizinstahl

## Verpackung (Verpackungseinheit 1)

- unsteril im Kunststoffröhrchen im Schlauchbeutel

## Aufbereitung

- sterilisierbar

## Verbundene Teile, Zubehör

- **Implantatbettaufrbereitung:**
  - 1) Vorbohrer (Artikel 20 20 19) , Pilotbohrer (20 15 16, 20 20 16), oder Pilotbohrer für Schablonen (20 20 20)
- **2) Aufbereitung mit 21 35 10**
  - **Optional bei hartem Knochen:**
    - 2b) Erweiterungsbohrer Ø 3,5 Länge 10 mm (Artikel 22 35 10)
    - 2c) oder Gewindeschneider Ø 3,5 (Artikel 23 35 00)
  - **Optional bei weichem Knochen:**
    - 2d) Osteotom gerade/gewinkelt Ø 3,5 (Artikel 30 35 11 / 30 35 12)
- **Zubehör:**
  - Medizinbecher für Knochenspäne (Artikel 99 00 00 B)
  - Dokumentation Bohrernutzung (Artikel 99 00 05)

## Weiterführende Informationen

- Chirurgiehandbuch
- Herstellerinformationen zur Wiederaufbereitung