


# Formbohrer 4,2 x 08 mm

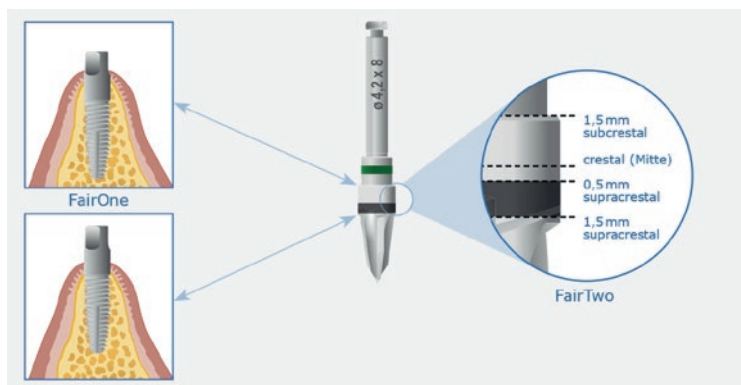

## Artikelnummer 21 42 08

- Vibrationsarmer und selbstzentrierender Bohrer für die formkongruente Implantatbettauflbereitung FairOne und FairTwo mit Durchmesser 4,2 mm und Nennlänge 08 mm;
- Kennung ein Farbring grün
- extrem lange Schnittlänge und Schnittfestigkeit,
- generiert Knochenspäne

## Eignung /Freigabe

- Max. 800 Umdrehungen pro Minute, wenig Druck
- Grünes Winkelstück mit Untersetzung 10:1
- Kühlung erforderlich
- Bohrer ist im Gebrauch regelmäßig von Knochenspänen zu reinigen

## Werkstoff und Eigenschaften

- Medizinstahl

## Verpackung (Verpackungseinheit 1)

- unsteril im Kunststoffröhrchen im Schlauchbeutel

## Aufbereitung

- sterilisierbar

## Verbundene Teile, Zubehör

- **Implantatbettauflbereitung:**
  - 1) Vorbohrer (Artikel 20 20 19) , Pilotbohrer (20 15 16, 20 20 16), oder Pilotbohrer für Schablonen (20 20 20)
  - 2) Formbohrer Ø 3,5 Länge 08 mm (Artikel 21 35 08)

### 3) Aufbereitung mit 21 42 08

#### Optional bei hartem Knochen:

- 3b) Erweiterungsbohrer Ø 4,2 Länge 08 mm (Artikel 22 42 08)
- 3c) oder Gewindeschneider Ø 4,2 (Artikel 23 42 00)

#### Optional bei weichem Knochen:

- 3d) Osteotom gerade/gewinkelt Ø 4,2 (Artikel 30 42 11 / 30 42 12)

- **Zubehör:**

- Medizinbecher für Knochenspäne (Artikel 99 00 00 B)
- Dokumentation Bohrernutzung (Artikel 99 00 05)

## Weiterführende Informationen

- Chirurgiehandbuch
- Herstellerinformationen zur Wiederaufbereitung