


Formbohrer 4,2 x 10 mm

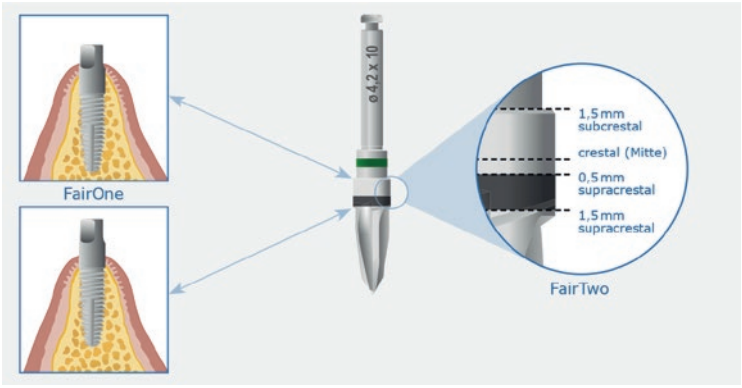

Artikelnummer 21 42 10

- Vibrationsarmer und selbstzentrierender Bohrer für die formkongruente Implantatbettauflbereitung FairOne und FairTwo mit Durchmesser 4,2 mm und Nennlänge 10 mm;
- Kennung ein Farbring grün
- extrem lange Schnittlänge und Schnittfestigkeit,
- generiert Knochenspäne

Eignung /Freigabe

- Max. 800 Umdrehungen pro Minute, wenig Druck
- Grünes Winkelstück mit Untersetzung 10:1
- Kühlung erforderlich
- Bohrer ist im Gebrauch regelmäßig von Knochenspänen zu reinigen

Werkstoff und Eigenschaften

- Medizinstahl

Verpackung (Verpackungseinheit 1)

- unsteril im Kunststoffröhrchen im Schlauchbeutel

Aufbereitung

- sterilisierbar

Verbundene Teile, Zubehör

- **Implantatbettauflbereitung:**
 - 1) Vorbohrer (Artikel 20 20 19) , Pilotbohrer (20 15 16, 20 20 16), oder Pilotbohrer für Schablonen (20 20 20)
 - 2) Formbohrer Ø 3,5 Länge 10 mm (Artikel 21 35 16)

3) Aufbereitung mit 21 42 10

Optional bei hartem Knochen:

- 3b) Erweiterungsbohrer Ø 4,2 Länge 10 mm (Artikel 22 42 10)
- 3c) oder Gewindeschneider Ø 4,2 (Artikel 23 42 00)

Optional bei weichem Knochen:

- 3d) Osteotom gerade/gewinkelt Ø 4,2 (Artikel 30 42 11 / 30 42 12)

- **Zubehör:**

- Medizinbecher für Knochenspäne (Artikel 99 00 00 B)
- Dokumentation Bohrernutzung (Artikel 99 00 05)

Weiterführende Informationen

- Chirurgiehandbuch
- Herstellerinformationen zur Wiederaufbereitung