


# Formbohrer 5,0 x 06 mm

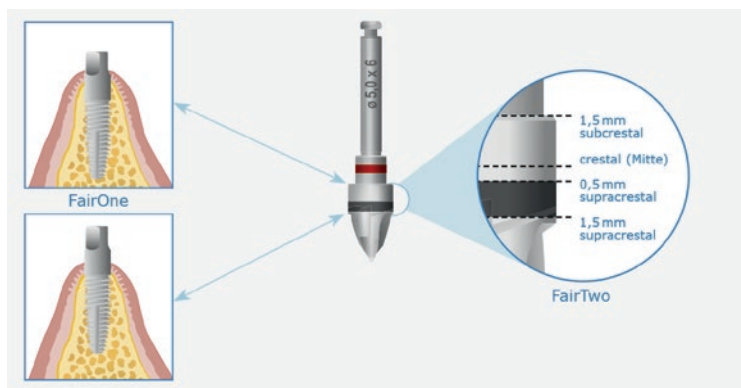

## Artikelnummer 21 50 06

- Vibrationsarmer und selbstzentrierender Bohrer für die formkongruente Implantatbettauflistung FairOne und FairTwo mit Durchmesser 5,0 mm und Nennlänge 06 mm;
- Kennung ein Farbring rot
- extrem lange Schnittlänge und Schnittfestigkeit,
- generiert Knochenspäne

## Eignung / Freigabe

- Max. 800 Umdrehungen pro Minute, wenig Druck
- Grünes Winkelstück mit Untersetzung 10:1
- Kühlung erforderlich
- Bohrer ist im Gebrauch regelmäßig von Knochenspänen zu reinigen

## Werkstoff und Eigenschaften

- Medizinstahl

## Verpackung (Verpackungseinheit 1)

- unsteril im Kunststoffröhrchen im Schlauchbeutel

## Aufbereitung

- sterilisierbar

## Verbundene Teile, Zubehör

- **Implantatbettauflistung:**
  - 1) Vorbohrer (Artikel 20 20 19), Pilotbohrer (20 15 16, 20 20 16), oder Pilotbohrer für Schablonen (20 20 20)
  - 2) Formbohrer Ø 4,2 Länge 06 mm (Artikel 21 42 06)
- **3) Aufbereitung mit 21 50 06**
  - **Optional bei hartem Knochen:**
    - 3b) Erweiterungsbohrer Ø 5,0 Länge 06 mm (Artikel 22 50 06)
    - 3c) oder Gewindeschneider Ø 5,0 (Artikel 23 50 00)
  - **Optional bei weichem Knochen:**
    - 3d) Osteotom gerade/gewinkelt Ø 5,0 (Artikel 30 50 11 / 30 50 12)
- **Zubehör:**
  - Medizinbecher für Knochenspäne (Artikel 99 00 00 B)
  - Dokumentation Bohrernutzung (Artikel 99 00 05)

## Weiterführende Informationen

- Chirurgiehandbuch
- Herstellerinformationen zur Wiederaufbereitung