


Formbohrer 5,0 x 08 mm

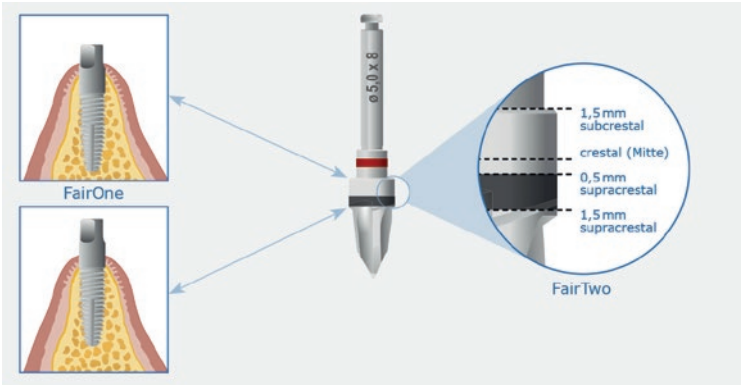

Artikelnummer 21 50 08

- Vibrationsarmer und selbstzentrierender Bohrer für die formkongruente Implantatbettaufbereitung FairOne und FairTwo mit Durchmesser 5,0 mm und Nennlänge 08 mm;
- Kennung ein Farbring rot
- extrem lange Schnittlänge und Schnittfestigkeit,
- generiert Knochenspäne

Eignung /Freigabe

- Max. 800 Umdrehungen pro Minute, wenig Druck
- Grünes Winkelstück mit Untersetzung 10:1
- Kühlung erforderlich
- Bohrer ist im Gebrauch regelmäßig von Knochenspänen zu reinigen

Werkstoff und Eigenschaften

- Medizinstahl

Verpackung (Verpackungseinheit 1)

- unsteril im Kunststoffröhrchen im Schlauchbeutel

Aufbereitung

- sterilisierbar

Verbundene Teile, Zubehör

- **Implantatbettaufbereitung:**
 - 1) Vorbohrer (Artikel 20 20 19) , Pilotbohrer (20 15 16, 20 20 16), oder Pilotbohrer für Schablonen (20 20 20)
 - 2) Formbohrer Ø 3,5 Länge 08 mm (Artikel 21 35 08)
 - 3) Formbohrer Ø 4,2 Länge 08 mm (Artikel 21 42 08)
- **4) Aufbereitung mit 21 50 10**
 - **Optional bei hartem Knochen:**
 - 4b) Erweiterungsbohrer Ø 5,0 Länge 08 mm (Artikel 22 50 08)
 - 4c) oder Gewindeschneider Ø 5,0 (Artikel 23 50 00)
 - **Optional bei weichem Knochen:**
 - 4d) Osteotom gerade/gewinkelt Ø 5,0 (Artikel 30 50 11 / 30 50 12)
- **Zubehör:**
 - Medizinbecher für Knochenspäne (Artikel 99 00 00 B)
 - Dokumentation Bohrernutzung (Artikel 99 00 05)

Weiterführende Informationen

- Chirurgiehandbuch
- Herstellerinformationen zur Wiederaufbereitung