


# Formbohrer 6,0 x 06 mm

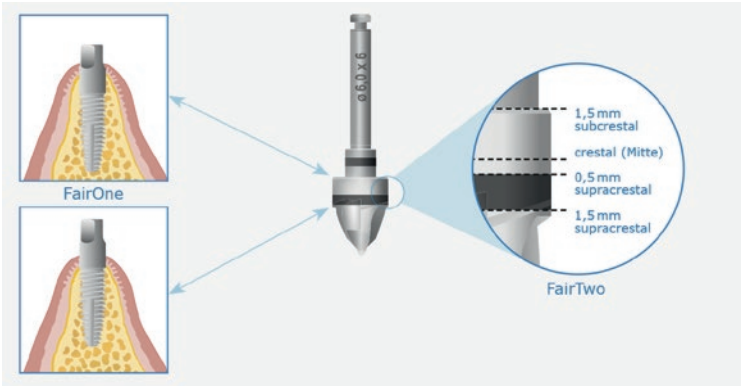

## Artikelnummer 21 60 06

- Vibrationsarmer und selbstzentrierender Bohrer für die formkongruente Implantatbettauflistung FairOne und FairTwo mit Durchmesser 6,0 mm und Nennlänge 06 mm;
- Kennung ein Farbring schwarz
- extrem lange Schnittlänge und Schnittfestigkeit,
- generiert Knochenspäne

## Eignung /Freigabe

- Max. 800 Umdrehungen pro Minute, wenig Druck
- Grünes Winkelstück mit Untersetzung 10:1
- Kühlung erforderlich
- Bohrer ist im Gebrauch regelmäßig von Knochenspänen zu reinigen

## Werkstoff und Eigenschaften

- Medizinstahl

## Verpackung (Verpackungseinheit 1)

- unsteril im Kunststoffröhrchen im Schlauchbeutel

## Aufbereitung

- sterilisierbar

## Verbundene Teile, Zubehör

- **Implantatbettauflistung:**
  - 1) Vorbohrer (Artikel 20 20 19) , Pilotbohrer (20 15 16, 20 20 16), oder Pilotbohrer für Schablonen (20 20 20)
  - 2) Formbohrer Ø 3,5 Länge 06 mm (Artikel 21 35 06)
  - 3) Formbohrer Ø 4,2 Länge 06 mm (Artikel 21 42 06)
  - 4) Formbohrer Ø 5,0 Länge 06 mm (Artikel 21 50 06)

### 5) Aufbereitung mit 21 60 06

#### Optional bei hartem Knochen:

- 5b) Erweiterungsbohrer Ø 6,0 Länge 06 mm (Artikel 22 60 06)
- 5c) oder Gewindeschneider Ø 6,0 (Artikel 23 60 00)

#### Optional bei weichem Knochen:

- 5d) Osteotom gerade/gewinkelt Ø 6,0 (Artikel 30 60 11 / 30 60 12)

- **Zubehör:**

- Medizinbecher für Knochenspäne (Artikel 99 00 00 B)
- Dokumentation Bohrernutzung (Artikel 99 00 05)

## Weiterführende Informationen

- Chirurgiehandbuch
- Herstellerinformationen zur Wiederaufbereitung