


Erweiterungsbohrer 3,5 x 08 mm

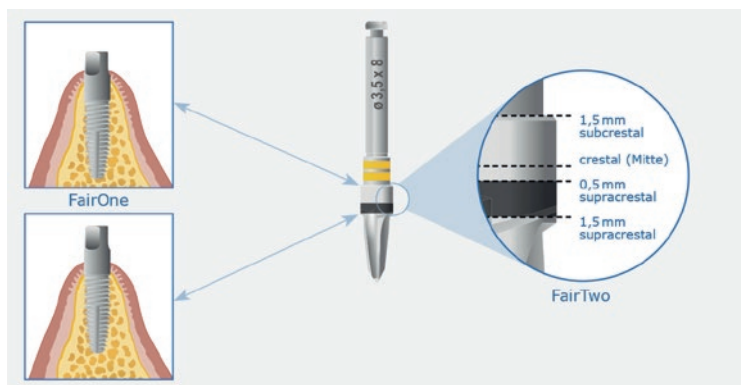

Artikelnummer 22 35 08

- Vibrationsarmer und selbstzentrierender Bohrer für die nahezu formkongruente Implantatbettauflage FairOne und FairTwo mit Durchmesser 3,5 mm und Nennlänge 08 mm;
- Kennung zwei Farbringe gelb
- extrem lange Schnittlänge und Schnittfestigkeit,
- generiert Knochenspäne

Eignung /Freigabe

- Eignet sich für harten Knochen bei FairOne oder FairTwo sowie die vereinfachte Insertion FairTwo, falls Primärstabilität nicht wesentlich ist
- Max. 800 Umdrehungen pro Minute, wenig Druck
- Grünes Winkelstück mit Untersetzung 10:1
- Kühlung erforderlich
- Bohrer ist im Gebrauch regelmäßig von Knochenspänen zu reinigen

Werkstoff und Eigenschaften

- Medizinstahl

Verpackung (Verpackungseinheit 1)

- unsteril im Kunststoffröhrchen im Schlauchbeutel

Aufbereitung

- sterilisierbar

Verbundene Teile, Zubehör

- **Implantatbettauflage:**
 - 1) Vorbohrer (Artikel 20 20 19) , Pilotbohrer (20 15 16, 20 20 16), oder Pilotbohrer für Schablonen (20 20 20)
- **2) Aufbereitung mit 22 35 08**
- **Optional bei hartem Knochen:**
 - 2b) Gewindeschneider Ø 3,5 (Artikel 23 35 00)
- **Zubehör:**
 - Medizinbecher für Knochenspäne (Artikel 99 00 00 B)
 - Dokumentation Bohrernutzung (Artikel 99 00 05)

Weiterführende Informationen

- Chirurgiehandbuch
- Herstellerinformationen zur Wiederaufbereitung