


# Erweiterungsbohrer 3,5 x 10 mm

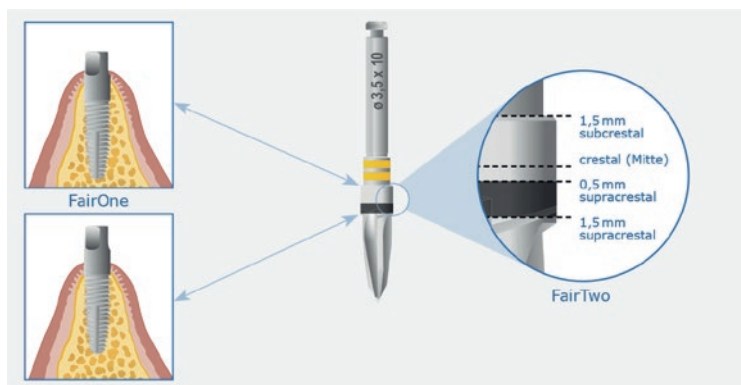

## Artikelnummer 22 35 10

- Vibrationsarmer und selbstzentrierender Bohrer für die nahezu formkongruente Implantatbettauflage FairOne und FairTwo mit Durchmesser 3,5 mm und Nennlänge 10 mm;
- Kennung zwei Farbringe gelb
- extrem lange Schnittlänge und Schnittfestigkeit,
- generiert Knochenspäne

## Eignung /Freigabe

- Eignet sich für harten Knochen bei FairOne oder FairTwo sowie die vereinfachte Insertion FairTwo, falls Primärstabilität nicht wesentlich ist
- Max. 800 Umdrehungen pro Minute, wenig Druck
- Grünes Winkelstück mit Untersetzung 10:1
- Kühlung erforderlich
- Bohrer ist im Gebrauch regelmäßig von Knochenspänen zu reinigen

## Werkstoff und Eigenschaften

- Medizinstahl

## Verpackung (Verpackungseinheit 1)

- unsteril im Kunststoffröhrchen im Schlauchbeutel

## Aufbereitung

- sterilisierbar

## Verbundene Teile, Zubehör

- **Implantatbettauflage:**
  - 1) Vorbohrer (Artikel 20 20 19), Pilotbohrer (20 15 16, 20 20 16), oder Pilotbohrer für Schablonen (20 20 20)
- **2) Aufbereitung mit 22 35 10**
- **Optional bei hartem Knochen:**
  - 2b) Gewindeschneider Ø 3,5 (Artikel 23 35 00)
- **Zubehör:**
  - Medizinbecher für Knochenspäne (Artikel 99 00 00 B)
  - Dokumentation Bohrernutzung (Artikel 99 00 05)

## Weiterführende Informationen

- Chirurgiehandbuch
- Herstellerinformationen zur Wiederaufbereitung