


# Erweiterungsbohrer 4,2 x 16 mm

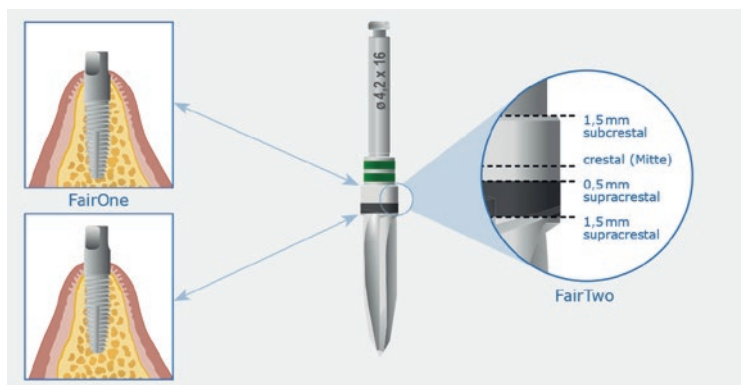

## Artikelnummer 22 42 16

- Vibrationsarmer und selbstzentrierender Bohrer für die nahezu formkongruente Implantatbettaufräse FairOne und FairTwo mit Durchmesser 4,2 mm und Nennlänge 16 mm;
- Kennung zwei Farbringe grün
- extrem lange Schnittlänge und Schnittfestigkeit,
- generiert Knochenspäne

## Eignung /Freigabe

- Eignet sich für harten Knochen bei FairOne oder FairTwo sowie die vereinfachte Insertion FairTwo, falls Primärstabilität nicht wesentlich ist
- Max. 800 Umdrehungen pro Minute, wenig Druck
- Grünes Winkelstück mit Untersetzung 10:1
- Kühlung erforderlich
- Bohrer ist im Gebrauch regelmäßig von Knochenspänen zu reinigen

## Werkstoff und Eigenschaften

- Medizinstahl

## Verpackung (Verpackungseinheit 1)

- unsteril im Kunststoffröhrchen im Schlauchbeutel

## Aufbereitung

- sterilisierbar

## Verbundene Teile, Zubehör

- **Implantatbettaufräse:**
  - 1) Vorbohrer (Artikel 20 20 19), Pilotbohrer (20 15 16, 20 20 16), oder Pilotbohrer für Schablonen (20 20 20)
  - 2) Form- oder Erweiterungsbohrer  
Ø 3,5 Länge 16 mm (Artikel 21 35 16 oder 22 35 16)

### 3) Aufbereitung mit 22 42 16

- **Optional bei hartem Knochen:**
  - 3b) Gewindeschneider Ø 4,2 (Artikel 23 42 00)
- **Zubehör:**
  - Medizinbecher für Knochenspäne (Artikel 99 00 00 B)
  - Dokumentation Bohrernutzung (Artikel 99 00 05)

## Weiterführende Informationen

- Chirurgiehandbuch
- Herstellerinformationen zur Wiederaufbereitung