


Erweiterungsbohrer 5,0 x 10 mm

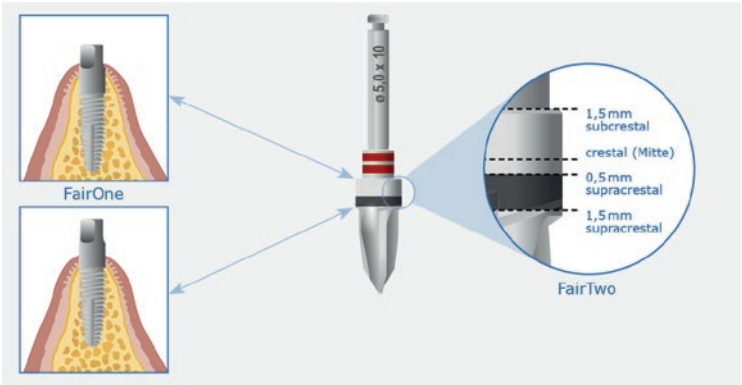

Artikelnummer 22 50 10

- Vibrationsarmer und selbstzentrierender Bohrer für die nahezu formkongruente Implantatbettaufräse FairOne und FairTwo mit Durchmesser 5,0 mm und Nennlänge 10 mm;
- Kennung zwei Farbringe rot
- extrem lange Schnittlänge und Schnittfestigkeit,
- generiert Knochenspäne

Eignung /Freigabe

- Eignet sich für harten Knochen bei FairOne oder FairTwo sowie die vereinfachte Insertion FairTwo, falls Primärstabilität nicht wesentlich ist
- Max. 800 Umdrehungen pro Minute, wenig Druck
- Grünes Winkelstück mit Untersetzung 10:1
- Kühlung erforderlich
- Bohrer ist im Gebrauch regelmäßig von Knochenspänen zu reinigen

Werkstoff und Eigenschaften

- Medizinstahl

Verpackung (Verpackungseinheit 1)

- unsteril im Kunststoffröhrchen im Schlauchbeutel

Aufbereitung

- sterilisierbar

Verbundene Teile, Zubehör

- **Implantatbettaufräse:**
 - 1) Vorbohrer (Artikel 20 20 19), Pilotbohrer (20 15 16, 20 20 16), oder Pilotbohrer für Schablonen (20 20 20)
 - 2) Form- oder Erweiterungsbohrer
Ø 3,5 Länge 10 mm (Artikel 21 35 10 oder 22 35 10)
 - 3) Form- oder Erweiterungsbohrer
Ø 4,2 Länge 10 mm (Artikel 21 42 10 oder 22 42 10)

4) Aufbereitung mit 22 50 10

- **Optional bei hartem Knochen:**
 - 4b) Gewindeschneider Ø 5,0 (Artikel 23 50 00)
- **Zubehör:**
 - Medizinbecher für Knochenspäne (Artikel 99 00 00 B)
 - Dokumentation Bohrernutzung (Artikel 99 00 05)

Weiterführende Informationen

- Chirurgiehandbuch
- Herstellerinformationen zur Wiederaufbereitung