


# Erweiterungsbohrer 6,0 x 08 mm

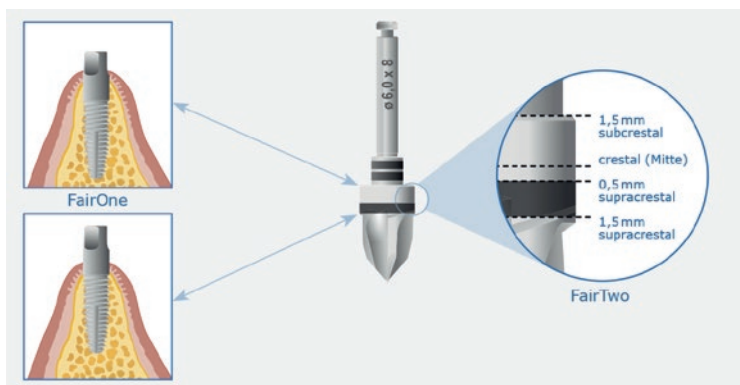

## Artikelnummer 22 60 08

- Vibrationsarmer und selbstzentrierender Bohrer für die nahezu formkongruente Implantatbettaufräbereiung FairOne und FairTwo mit Durchmesser 6,0 mm und Nennlänge 08 mm;
- Kennung zwei Farbringe schwarz
- extrem lange Schnittlänge und Schnittfestigkeit,
- generiert Knochenspäne

## Eignung /Freigabe

- Eignet sich für harten Knochen bei FairOne oder FairTwo sowie die vereinfachte Insertion FairTwo, falls Primärstabilität nicht wesentlich ist
- Max. 800 Umdrehungen pro Minute, wenig Druck
- Grünes Winkelstück mit Untersetzung 10:1
- Kühlung erforderlich
- Bohrer ist im Gebrauch regelmäßig von Knochenspänen zu reinigen

## Werkstoff und Eigenschaften

- Medizinstahl

## Verpackung (Verpackungseinheit 1)

- unsteril im Kunststoffröhrchen im Schlauchbeutel

## Aufbereitung

- sterilisierbar

## Verbundene Teile, Zubehör

- **Implantatbettaufräbereiung:**
  - 1) Vorbohrer (Artikel 20 20 19) , Pilotbohrer (20 15 16, 20 20 16), oder Pilotbohrer für Schablonen (20 20 20)
  - 2) Form- oder Erweiterungsbohrer  
Ø 3,5 Länge 08 mm (Artikel 21 35 08 oder 22 35 08)
  - 3) Form- oder Erweiterungsbohrer  
Ø 4,2 Länge 08 mm (Artikel 21 42 08 oder 22 42 08)
  - 4) Form- oder Erweiterungsbohrer  
Ø 5,0 Länge 08 mm (Artikel 21 50 08 oder 22 50 08)

### 5) Aufbereitung mit 22 60 08

#### Optional bei hartem Knochen:

5b) Gewindeschneider Ø 6,0 (Artikel 23 60 00)

- **Zubehör:**
  - Medizinbecher für Knochenspäne (Artikel 99 00 00 B)
  - Dokumentation Bohrernutzung (Artikel 99 00 05)

## Weiterführende Informationen

- Chirurgiehandbuch
- Herstellerinformationen zur Wiederaufbereitung