


Erweiterungsbohrer 6,0 x 13 mm

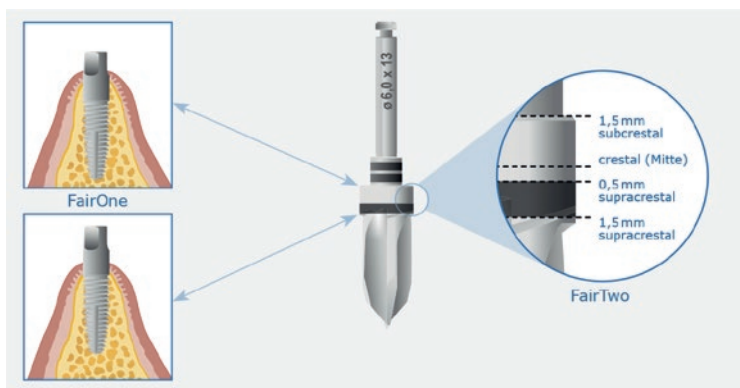

Artikelnummer 22 60 13

- Vibrationsarmer und selbstzentrierender Bohrer für die nahezu formkongruente Implantatbettaufräsuren FairOne und FairTwo mit Durchmesser 6,0 mm und Nennlänge 13 mm;
- Kennung zwei Farbringe schwarz
- extrem lange Schnittlänge und Schnittfestigkeit,
- generiert Knochenspäne

Eignung /Freigabe

- Eignet sich für harten Knochen bei FairOne oder FairTwo sowie die vereinfachte Insertion FairTwo, falls Primärstabilität nicht wesentlich ist
- Max. 800 Umdrehungen pro Minute, wenig Druck
- Grünes Winkelstück mit Untersetzung 10:1
- Kühlung erforderlich
- Bohrer ist im Gebrauch regelmäßig von Knochenspänen zu reinigen

Werkstoff und Eigenschaften

- Medizinstahl

Verpackung (Verpackungseinheit 1)

- unsteril im Kunststoffröhrchen im Schlauchbeutel

Aufbereitung

- sterilisierbar

Verbundene Teile, Zubehör

- **Implantatbettaufräsuren:**
 - 1) Vorbohrer (Artikel 20 20 19) , Pilotbohrer (20 15 16, 20 20 16), oder Pilotbohrer für Schablonen (20 20 20)
 - 2) Form- oder Erweiterungsbohrer
Ø 3,5 Länge 13 mm (Artikel 21 35 13 oder 22 35 13)
 - 3) Form- oder Erweiterungsbohrer
Ø 4,2 Länge 13 mm (Artikel 21 42 13 oder 22 42 13)
 - 4) Form- oder Erweiterungsbohrer
Ø 5,0 Länge 13 mm (Artikel 21 50 13 oder 22 50 13)

5) Aufbereitung mit 22 60 13

Optional bei hartem Knochen:

5b) Gewindeschneider Ø 6,0 (Artikel 23 60 00)

- **Zubehör:**
 - Medizinbecher für Knochenspäne (Artikel 99 00 00 B)
 - Dokumentation Bohrernutzung (Artikel 99 00 05)

Weiterführende Informationen

- Chirurgiehandbuch
- Herstellerinformationen zur Wiederaufbereitung