


Abutment Rescue Ø 4,2

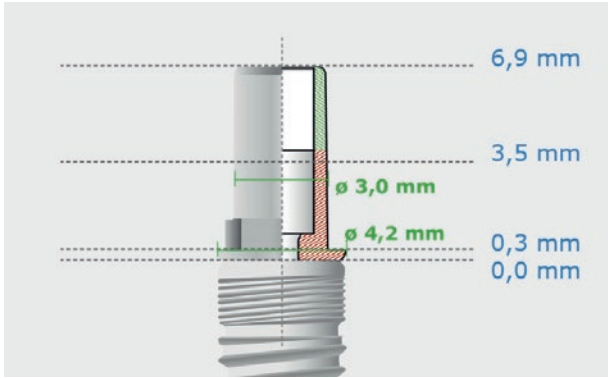

Artikelnummer 40 42 99

- Für FairTwo Platform Durchmesser 4,2 mm
- Der Abutmentkamin ist leicht konisch und verfügt über eine Rotationssicherung.
- Dieses Abutment verfügt über eine Stoß-auf-Stoß Verbindung zum Implantat. Damit fallen alle Vorteile der konischen Innenverbindung und des Platform Switchings weg. Dafür gewinnt man hinsichtlich einer ästhetischen Versorgung insbesondere bei herausstehenden Implantaten Möglichkeiten.
- CAVE! Wägen Sie den Einsatz dieses Abutments gründlich ab. Sorgen Sie für einen günstigen Zugang zum Schraubkanal, um eine Reinigung oder ein Festdrehen der Schraube einfach zu ermöglichen. Die Abutments verfügen deshalb auch nicht über ein die Schraube festhaltendes Innengewinde.
- Der Abutmentkamin ist leicht konisch und verfügt über eine Rotationssicherung.

Eignung /Freigabe

- Labor: Eindrehmoment max. 10 Ncm
- Definitives Eindrehmoment: 25 Ncm

Werkstoff und Eigenschaften

- Abutment: Reintitan medical grade 4
- Abutmentschraube: Titan medical grade 5

Verpackung (Verpackungseinheit 1)

- unsteril im Schlauchbeutel

Aufbereitung

- sterilisierbar

Verbundene Teile, Zubehör

- Schraubendreher für Winkelstück (Artikel 90 00 05, 90 00 06)
- Schraubendreher für Ratsche (Artikel 90 00 07, 90 00 08, 90 00 10)
- Einheilkappe rescue Ø 4,2 (Artikel 42 42 99)
- Abutmentschraube S (Artikel 41 16 00)

Weiterführende Informationen

- Prothetikhandbuch
- Herstellerinformation zur Wiederaufbereitung