


Abformpfosten FT geschlossen S

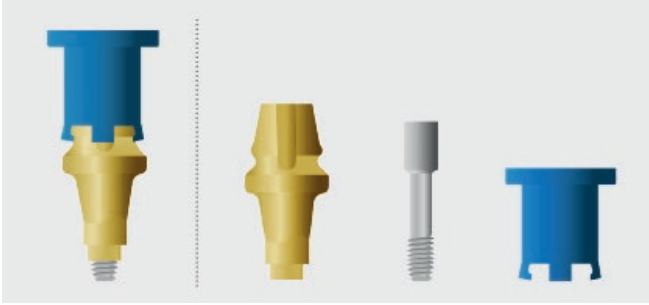

Artikelnummer 42 16 02

- Abformpfosten für die geschlossene Abformung für alle FairTwo Platform S (Durchmesser 3,5 und 4,2 mm) bestehend aus einem Abformpfosten, einer Abformpfostenschraube und Kappe.
- Die Abformpfostenschraube ist gegen unabsichtliches Herausfallen aus dem Pfosten gesichert.
- Die Schraube greift erst, wenn die richtige Position der Rotationssicherung erreicht ist.
- Anschließend ist die Kappe aufzusetzen. Dazu werden die zwei Klemmnasen in die Führungsnuten gefügt und bis zum spürbaren Einrasten aufgesetzt.

Eignung /Freigabe

- Eindrehmoment max. 10 Ncm

Werkstoff und Eigenschaften

- Abformpfosten: Reintitan medical grade 4, gelb anodisiert
- Abformpfostenschraube: Titan medical grade 5
- Kappe: POM

Verpackung (Verpackungseinheit 1)

- unsteril im Schlauchbeutel

Aufbereitung

- Abformpfosten und Abformpfostenschraube sterilisierbar
- Kappe: desinfizierbar

Verbundene Teile, Zubehör

- Schraubendreher für Winkelstück (Artikel 90 00 05, 90 00 06)
- Schraubendreher für Ratsche (Artikel 90 00 07, 90 00 08, 90 00 10)
- Laboranalog S (Artikel 80 16 01)
- Abformpfosten Kappen FT (Artikel 42 16 00)

Weiterführende Informationen

- Prothetikhandbuch
- Herstellerinformation zur Wiederaufbereitung