


Abformpfosten FT L

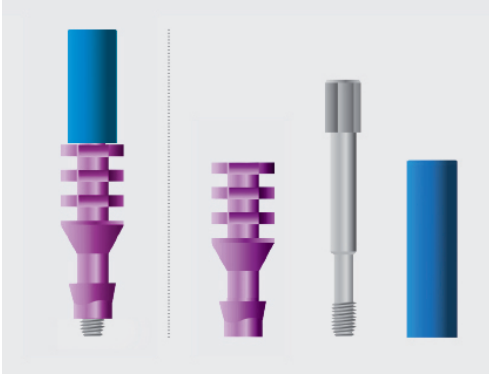

Artikelnummer 42 20 01

- Abformpfosten für die offene Abformung für alle FairTwo Platform L (Durchmesser 5,0 und 6,0 mm) bestehend aus einem Abformpfosten, einer Abformpfostenschraube und einer Schutzkappe gegenüber Abformmasse.
- Die Abformpfostenschraube ist gegen unabsichtliches Herausfallen aus dem Pfosten gesichert.
- Die Schraube greift erst, wenn die richtige Position der Rotationssicherung erreicht ist. Anschließend ist die Schraube leicht festzudrehen.
- Die Stufe am Konus ist in der definitiven Position zur Abformung bündig mit der Implantatschulter. Die Schutzkappe hält der Schraubkopf von Abformmasse frei und kann individuell angepasst oder weggelassen werden.

Eignung /Freigabe

- Eindrehmoment max. 10 Ncm

Werkstoff und Eigenschaften

- Abformpfosten: Medizinstahl oder Reintitan medical grade 4, rot anodisiert
- Abformpfostenschraube: Medizinstahl
- Schutzkappe: POM

Verpackung (Verpackungseinheit 1)

- unsteril im Schlauchbeutel

Aufbereitung

- Abformpfosten und Abformpfostenschraube sterilisierbar
- Schutzkappe: desinfizierbar

Verbundene Teile, Zubehör

- Schraubendreher für Winkelstück (Artikel 90 00 05, 90 00 06)
- Schraubendreher für Ratsche (Artikel 90 00 07, 90 00 08, 90 00 10)
- Laboranalog L (Artikel 80 20 01)

Weiterführende Informationen

- Prothetikhandbuch
- Herstellerinformation zur Wiederaufbereitung