


# Abformpfosten FT geschlossen L

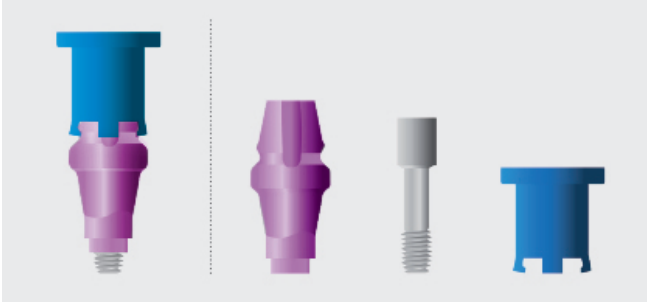

## Artikelnummer 42 20 02

- Abformpfosten für die geschlossene Abformung für alle FairTwo Platform L (Durchmesser 5,0 und 6,0 mm) bestehend aus einem Abformpfosten, einer Abformpfostenschraube und Kappe.
- Die Abformpfostenschraube ist gegen unabsichtliches Herausfallen aus dem Pfosten gesichert.
- Die Schraube greift erst, wenn die richtige Position der Rotationssicherung erreicht ist.
- Nach dem Festziehen der Schraube ist die Kappe aufzusetzen. Dazu werden die zwei Klemmnasen in die Führungsnuten gefügt und bis zum spürbaren Einrasten aufgesetzt.

## Eignung /Freigabe

- Eindrehmoment max. 10 Ncm

## Werkstoff und Eigenschaften

- Abformpfosten: Reintitan medical grade 4, rot anodisiert
- Abformpfostenschraube: Titan medical grade 5
- Kappe: POM

## Verpackung (Verpackungseinheit 1)

- unsteril im Schlauchbeutel

## Aufbereitung

- Abformpfosten und Abformpfostenschraube sterilisierbar
- Kappe: desinfizierbar

## Verbundene Teile, Zubehör

- Schraubendreher für Winkelstück (Artikel 90 00 05, 90 00 06)
- Schraubendreher für Ratsche (Artikel 90 00 07, 90 00 08, 90 00 10)
- Laboranalog L (Artikel 80 20 01)
- Abformpfosten Kappen FT (Artikel 42 16 00)

## Weiterführende Informationen

- Prothetikhandbuch
- Herstellerinformation zur Wiederaufbereitung